

Biatain[®] Super Adhesive



Opatrunek Biatain Super Adhesive jest zbudowany z hydrokapilarnej warstwy z superabsorbentem i półprzepuszczalnej hydrokoloidowej warstwy samoprzylepnej. Taka budowa umożliwia pełne wykorzystanie właściwości absorpcyjnych opatrunku.

- wilgotne środowisko leczenia ran⁵⁻⁷
- odpowiedni dla ran silnie sączących^{6,8}
- łatwa aplikacja^{5,8}



Wskazania


Biatain Super Adhesive jest wskazany w szerokim zakresie leczenia ran. Można go stosować na rany ostre, takie jak miejsca pobrania, rany pooperacyjne i rany pourazowe oraz rany przewlekłe, takie jak owrzodzenia podudzi, owrzodzenia odleżynowe. Nadaje się do stosowania w połączeniu z kompresjoterapią.

Sposób aplikacji

Chwycić tak, aby zapewnić aseptyczną aplikację. Zdejmując folię ochronną, nałożyć stronę przylepną do rany. Usunąć folię i wygładzić warstwę hydrokoloidową na skórze.

Zmiana opatrunku

W zależności od ilości wysięku, stanu opatrunku i rodzaju rany opatrunki Biatain Super mogą pozostać na ranie maksymalnie do 7 dni.

	nazwa	rozmiar (cm)	rozmiar wkładu chłonnego (cm)	numer katalogowy	refundacja	ilość sztuk w opakowaniu
	Biatain Super Adhesive Opatrunek hydrokapilarny, przylepny	10 x 10	5 x 5	046 100	TAK	10
		15 x 15	8 x 8	046 150		10
		20 x 20	11 x 11	046 200		10