




INADINE opatrunek nieprzywierający z jodyną powidonową

Nieprzywierający opatrunek z jodopowidonem (ang. povidoneiodine, PVP-I) INADINE™ jest wykonany z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności impregnowanej glikolem polietylenowym (ang. polyethylene glyco, PEG), zawierającym 10% jodopowidonu, co odpowiada 1,0% dostępnego jodu.

Działanie:

- jod jest bardzo skutecznym, działającym miejscowo środkiem bakteriobójczym, który w praktyce klinicznej stosowany jest do leczenia ran od ponad 170 lat. Zapewnia długotrwały efekt bakteriobójczy i stwarza antyseptyczne środowisko rany

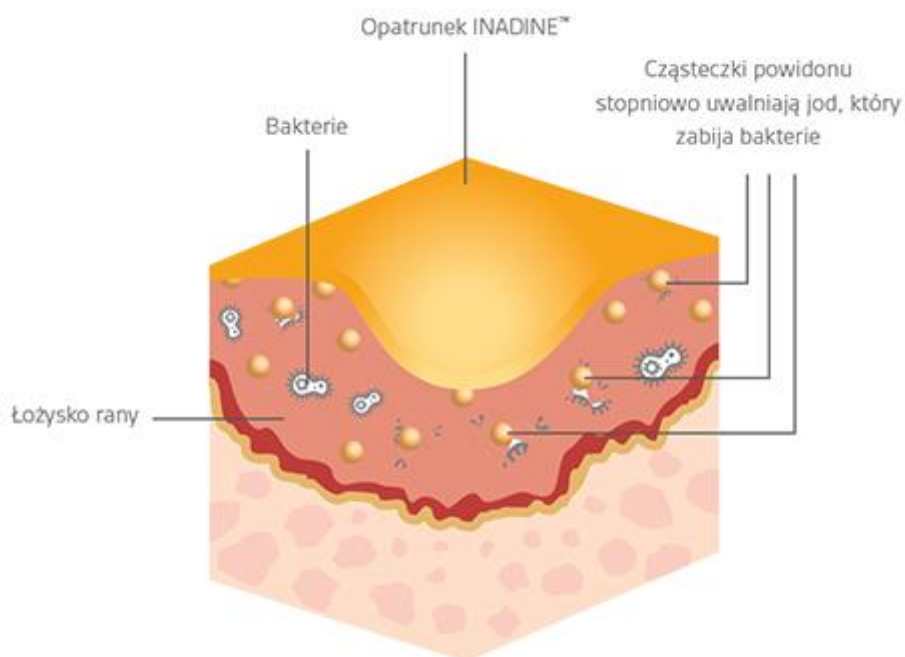

Wskazania:

- rany zainfekowane i zagrożone infekcją
- rany przewlekłe
- otarcia skaleczenia
- rany pooperacyjne
- odleżyny

Mechanizm działania:

- opatrunek wykonany z gładkich włókien wiskozowych impregnowanych maścią zawierającą 10% jodynę powidonową (PVP-1)
- szerokie spektrum działania bakteriobójczego (bakterie i zarodniki, grzyby, wirusy)

W miarę uwalniania jodopowidonu z opatrunku INADINE™, opatrunek będzie zmieniał kolor z pomarańczowego na biały.

Zmiana koloru wskazuje, jak często należy zmieniać opatrunek, co zapobiega niepotrzebnym, jak bywa w przypadku innych opatrunków, zmianom. Może to obniżać koszty leczenia.




W badaniach *in vitro* wykazano, że opatrunek INADINE™ jest skuteczny w zwalczaniu biofilmów w ranach przewlekłych, a w porównaniu z sześcioma przeciwważnymi opatrunkami ze srebrem tylko jod wykazywał skuteczność w zwalczaniu badanych biofilmów w ranach po 7 dniach⁸.

90%

Podczas oceny klinicznej 90% pacjentów zgłosiło brak przylegania do łożyska rany i brak bólu przy zmianie opatrunku⁷.

Aplikacja:

- zdjąć papier ochronny
- nałożyć INADINE* bezpośrednio na całą powierzchnię rany
- zastosować opatrunek wtórny (np. TIELLE*)
- utrata intensywności koloru opatrunku sygnalizuje konieczność jego zmiany
- delikatnie rozciągnąć przeciwległe rogi opatrunku, aby ułatwić jego zdjęcie

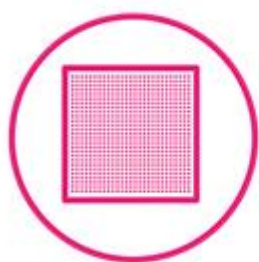

Opatrunek INADINE™ może być stosowany jako opatrunek podstawowy lub w połączeniu z innymi opatrunkami.



Inadine		
rozmiar	ilość w opakowaniu	kod produktu
5 x 5 cm	25 szt.	PO1481
9,5 x 9,5 cm	25 szt.	PO1512

