



NU-GEL hydrożel z alginianem

Działanie:

- nawilża rany
- delikatnie zmiękcza tkankę martwiczą i włóknik
- powoduje rehydrację tkanki martwiczej oraz jej absorpcję pobudza proces ziarninowania rany

Wskazania:

- rany z tkanką martwiczą
- rany z włóknikiem
- rany gojące się przez ziarninowanie
- rany głębokie, szczelinowe
- rany przewlekłe, oparzenia

Mechanizm działania:

- zawarte w hydrożelu alginian sodu i chlorek sodu rozmiękcza i nawilża zewnętrzną tkankę, wiąże nadmiar wysięku tworząc fizjologiczne, wilgotne środowisko gojenia rany

Aplikacja:

- sucha tkanka martwicza: hydrożel na ranie do 3 dni
- wilgotna tkanka martwicza lub włóknik: zmiana co 1-2 dni
- nakładać na ranę około 0,5 cm warstwę hydrożelu
- kształt opakowania ułatwiający aplikację



Nu-Gel		
rozmiar	ilość w opakowaniu	kod produktu
15 g	10 szt.	MNG415
25 G	6 szt.	MNG425

